

EDDY

EDUCATION
BUDDY





QUICK START GUIDE

corpuls® EDDY – How to start



1

Mitgelieferten **WLAN-Adapter** in die Steckdose stecken – WLAN baut sich selbständig auf

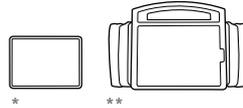
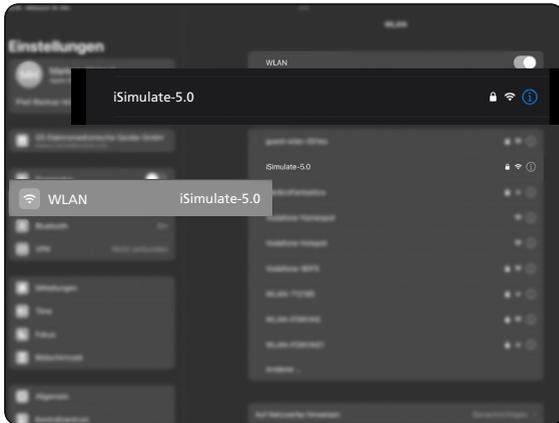


2

Beide iPads mit dem von der Puppe bereit gestellten WLAN verbinden: „iSimulate-5.0“ (Pw: iSimulate2012)

3

Auf beiden iPads **corpuls simulation** starten

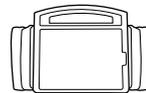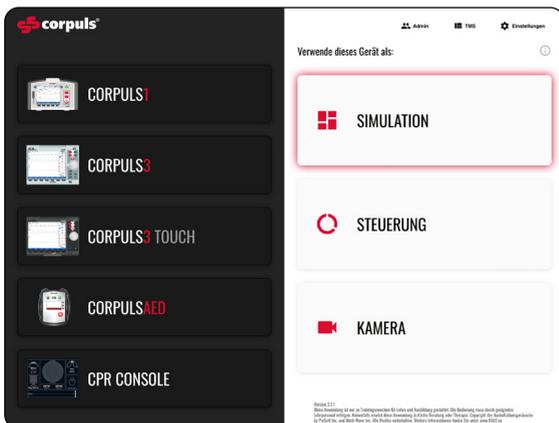


4

Auf dem Monitor-iPad „**SIMULATION**“ wählen


5

Gewünschtes **Gerät** auswählen

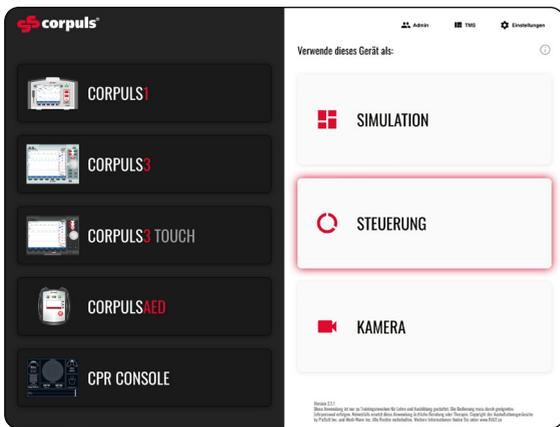



6

Auf dem Instructor-iPad
„**STEUERUNG**“ auswählen

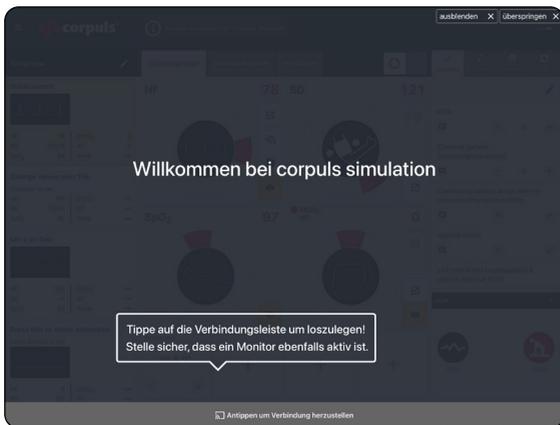


7

Auf dem Instructor-iPad
auf den grauen Balken tippen
und **Verbindung herstellen**

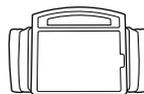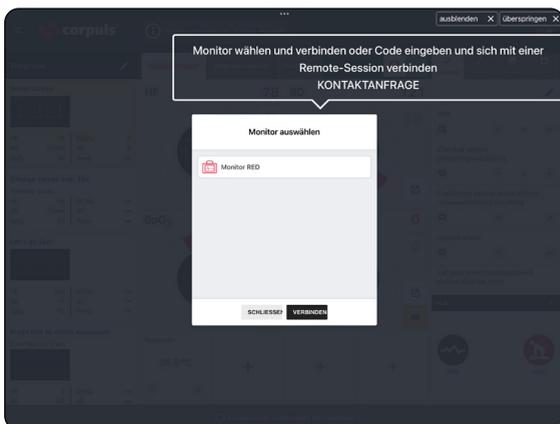


8



Auf dem Monitor-iPad
Gerät auswählen & verbinden

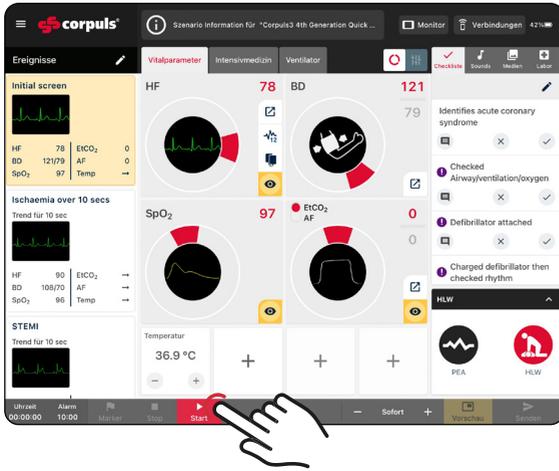

9
Auf dem Instructor-iPad
„Szenario“ auswählen &
„Start“ tippen

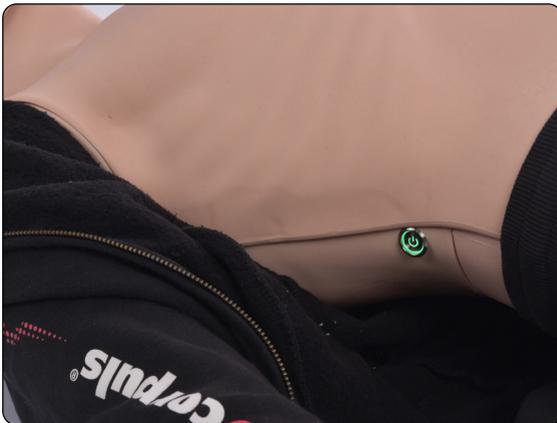

10
Übungspuppe **einschalten**

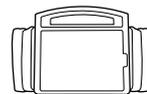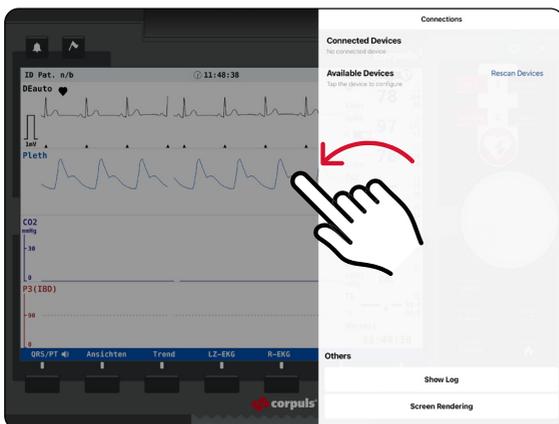

11
Auf Monitor-iPad von **rechtem**
Rand **nach links** wischen,
„Verbindungen“ öffnen

12
Unter „Available Devices“ die
gewünschte **Übungspuppe**
auswählen und verbinden